

**Available language: English | Tiếng Việt | 中文**



## 1.

Inspect packaging and system for any damage or defects. Do not use if external envelope is damaged

Kiểm tra bao bì và hạn sử dụng. Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng

檢查包材與使用期限。包裝如有破損，請勿使用



## 2.

Open sterilized packaging bag and take product out

Mở bao bì và lấy sản phẩm ra

把袋子撕開與取出產品



## 3.

Close roller clamp.

Khóa bộ điều chỉnh lại.

關閉調整器



#### 4.

Remove Spike Cap and Insert spike vertically into solution container.

Tháo bỏ nắp kim ống và cắm kim ống vào bình chứa dịch, thuốc theo phương thẳng đứng.

折開瓶針蓋後來把點滴液瓶口朝上，將導針座直插入瓶口



#### 5.

Suspend solution container on the rack, Squeeze and release drip chamber until fluid reaches 2/3 of drip chamber.

Treo ngược bình chứa dịch, thuốc lên giá treo sau đó bóp và thả ống truyền dịch đến khi lượng dịch, thuốc dâng lên 2/3 ống truyền dịch.

將輸液（藥）瓶掛在架子上，然後擠壓並鬆開點滴筒，直到輸液量和藥品的量增加到點滴筒的 2/3。



#### 6.

Open Air valve, remove luer lock cap, Partially open roller clamp then flush tubing off all air and close roller clamp.

Mở van khí, tháo bỏ nắp để kim, nới lỏng bộ điều chỉnh sau đó tiến hành đuổi khí đến khi không còn không khí trong ống dây và khóa bộ điều chỉnh lại.

打開空氣閥，折開針座蓋，鬆開調整器，然後進行排氣，直到管子中沒有空氣並鎖定調整器。



## 7.

Connect the luer connector to needle or subcutaneous IV devices then loosen the regulator to change the infusion flow rate as desired

Kết nối để kim với kim tiêm hoặc thiết bị tiêm truyền tĩnh mạch dưới da sau đó nới lỏng bộ điều chỉnh để thay đổi tốc độ truyền dịch như mong muốn.

將針座連接到注射針或皮下靜脈注射裝置，然後鬆開調整器以根據需要更改輸液速度。



## 8.

Once finished infusion process, close roller clamp and safety cap.

Then discard in the sharp collector and adhere to your instruction's policy for safe disposal of all medical waste.

Kết thúc quá trình truyền dịch, khóa bộ điều chỉnh và đậy nắp bảo vệ lại.

Sau đó bỏ vào thùng rác y tế và tuân thủ chính sách hướng dẫn để xử lý an toàn tất cả chất thải y tế

結束輸液過程，鎖調整器與蓋上保護蓋放入垃圾桶與遵守處理廢質之安全