

**Available language: English | Tiếng Việt | 中文**

**Standard type  
標準型**




**1.**

Inspect packaging and system for any damage or defects. Do not use if external envelope is damaged

Kiểm tra bao bì và hạn sử dụng. Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng.

檢查包材與使用期限。包裝如有破損，請勿使用

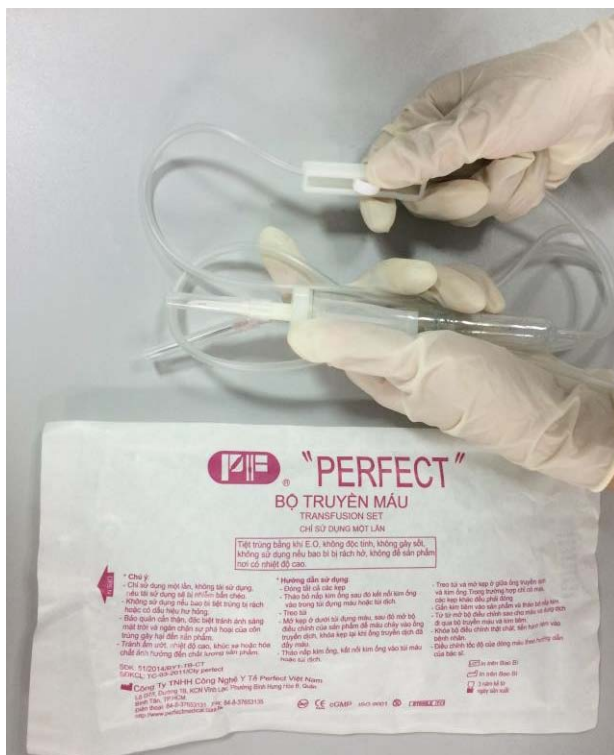


**2.**

Open sterilized packaging bag and take product out

Mở bao bì và lấy sản phẩm ra

把袋子撕開與取出產品

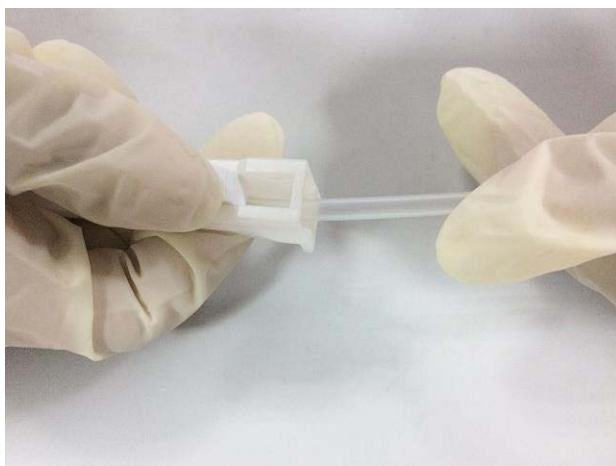

### **3.**

Close roller clamp until roller meets bottom of frame.

Khóa chặt bộ điều chỉnh lại

關閉調整器



### **4.**

Remove spike cap

Tháo bỏ nắp kim ống

折開瓶針蓋




## **5.**

Connect blood bag with spike.  
Cắm kim ống vào túi chứa máu  
插針入在裝血袋子



## **6.**

Press the drip chamber to let blood in the bag into the drip Chamber.  
Bóp và thả ống truyền dịch để máu vào trong ống chuyển dịch  
點滴筒壓緊然後慢慢放鬆讓血進入點滴筒裡面

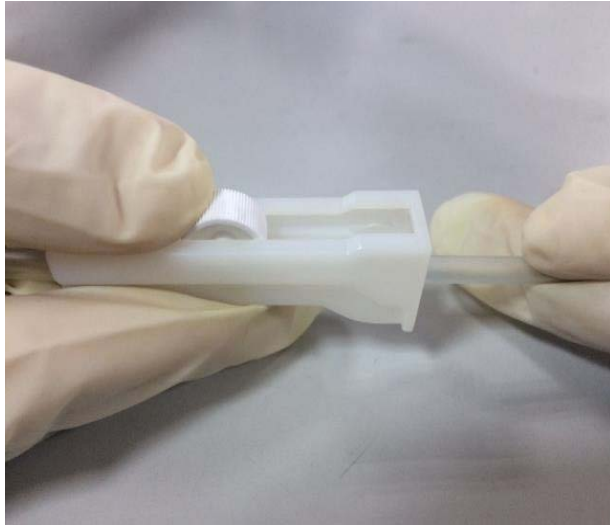

**7.**

Open a part of the regulator for expelling then close it.

Mở một phần bộ điều chỉnh để tiến hành đuổi khí sau đó đóng lại.

打開調整器一部份來進行排氣，然後密鎖。




**7.**

Remove the needle cap then insert the needle into the injection site.

Mở nắp kim tiêm sau đó đưa kim vào vị trí tiêm.

打開針蓋，把注射針放入注射位置。

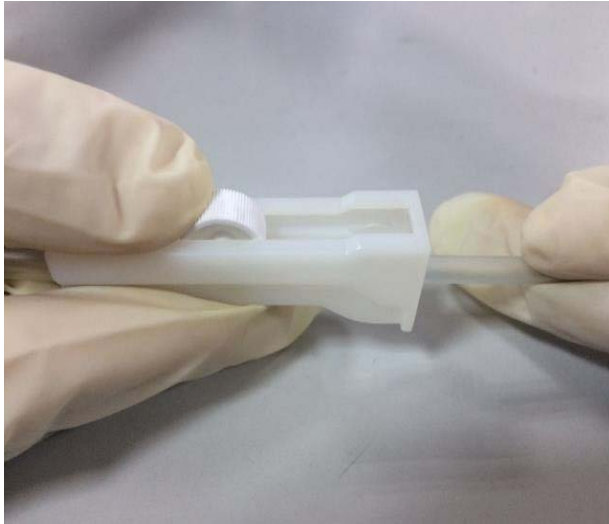


## 8.

Adjust the regulator to achieve the desired flow rate.

Điều chỉnh bộ điều chỉnh để đạt lưu lượng mong muốn.

調整調整器到適合的流量。

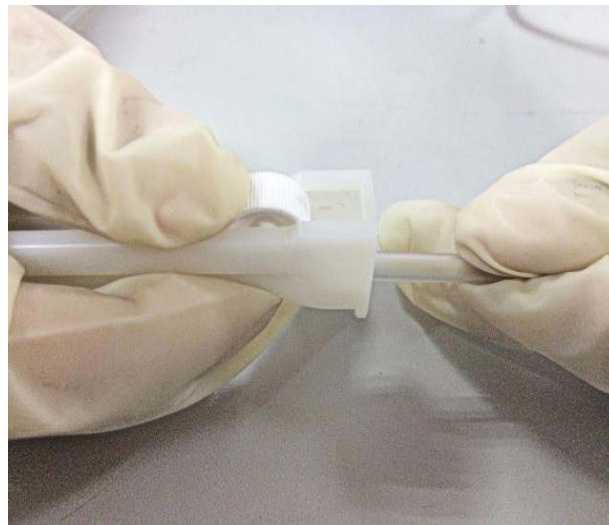

## 9.

Close clamp after transfusion is finished. Discard them in the sharp collector and adhere to your instruction's policy for safe disposal of all medical waste.

Khóa chặt bộ điều chỉnh sau hoàn thành việc truyền máu. Sau khi sử dụng xong bỏ vào thùng rác y tế và tuân theo hướng dẫn để xử lý an toàn tất cả chất thải y tế.

輸血完成後密鎖調整器。使用好後丟進醫療垃圾桶與遵守醫療廢質安全處理引導。