

**Available language: English | Tiếng Việt | 中文**



## 1.

Inspect packaging and system for any damage or defects. Do not use if external envelope is damaged

Kiểm tra bao bì và hạn sử dụng. Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng

檢查包材與使用期限。包裝如有破損，請勿使用



## 2.

Open sterilized packaging bag and take product out

Mở bao bì và lấy sản phẩm ra

把袋子撕開與取出產品



### 3.

Close the clamp.

Khóa kẹp tròn nhỏ lại

密鎖小圓管夾



### 4.

Remove the needle protector of Winged Needle Set.

Tháo bỏ nắp bảo vệ kim

拆開針頭保護蓋



### 5.

Insert to the intended site then fix the plastic wings.

(The aseptic technique of skin preparation before injection is essential.)

Đưa kim vào vị trí tiêm và cố định cánh bướm

把針頭放入注射位置與固定蝴蝶翼



**6.**

Remove the connector cap

Mở nắp đầu nối.

接頭蓋打開。




**7.**

Attach connector to the tip of infusion set or the nozzle of syringe

Kết nối đầu nối với dây truyền dịch hoặc ống bơm tiêm

結合輸液管或者注射筒

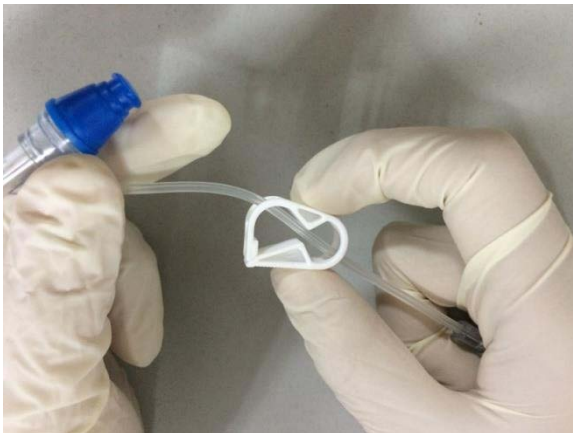

**8.**

Open clamp to start to do injection.

Mở khóa kẹp tròn nhỏ để bắt đầu tiêm

打開圓管夾與開始注射



## 9.

After using, discard them in the sharp collector and adhere to your instruction's policy for safe disposal of all medical waste.

Sau khi sử dụng xong bỏ vào thùng rác y tế và tuân theo hướng dẫn để xử lý an toàn tất cả chất thải y tế.

使用好後丟進醫療垃圾桶與遵守醫療廢質安全處理引導。