

Available language: English | Tiếng Việt | 中文



1.

Inspect packaging and system for any damage or defects. Do not use if external envelope is damaged

Kiểm tra bao bì và hạn sử dụng. Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng

檢查包材與使用期限。包裝如有破損，請勿使用



2.

Open sterilized packaging bag and take product out

Mở bao bì và lấy sản phẩm ra

把袋子撕開與取出產品



3.

Open female luer lock cap

Mở nắp để đỡ

打開承接座蓋



4.

Connect to the product in accordance with user's intent

Kết nối vào sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng của Y - Bác sĩ

依照醫師的使用目的來適合連接產品



5.

Open the male luer lock cap.

Mở nắp để kim.

打開針座蓋



6.

Connect the luer connector to other products on demand .

After use, put it in the medical waste garbage and follow the instructions to safely treat all medical waste.

Kết nối để kim với các sản phẩm phù hợp nhu cầu sử dụng .

Sau khi sử dụng xong bỏ vào thùng rác y tế và tuân theo hướng dẫn để xử lý an toàn tất cả chất thải y tế.

依照使用目的連接針座與其他產品

使用好後丟進醫療垃圾桶與遵守醫療廢質安全處理引導.