

Available language: English |Tiếng Việt| 中文

\* Intended use:

Gauze Sponge (Sterile) is used to apply medicine on the surface of the patient's body or absorb a small amount of body fluids on the body surface.

\* Mục đích sử dụng :

Miếng gạc (tiệt trùng) được sử dụng để bôi thuốc lên bề mặt cơ thể bệnh nhân hoặc hấp thụ một lượng nhỏ chất dịch cơ thể trên bề mặt cơ thể.

\* 目的使用

紗布墊(滅菌)用於患者身體表面的塗藥或吸收體表少量體液。



1.

Inspect packaging and expiry date. Do not use if external envelope is damaged

Kiểm tra bao bì và hạn sử dụng. Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng

檢查包材與使用期限。包裝如有破損，請勿使用



## 2.

Open sterilized packaging bag and take product out  
Mở bao bì và lấy sản phẩm ra

把袋子撕開與取出產品



## 3.

Cover to the wound as directed by doctor or  
healthcare professional.

Đắp lên chỗ vết thương theo chỉ định của y bác sĩ.

按照醫生或醫療保健專業人員的指示覆蓋傷

口。



#### **4.**

Use tape to secure in place

After use, discard in the waste collection.

And adhere to instruction's policy for safe disposal of all medical waste.

Dùng băng keo cố định lại để không rơi ra khỏi vị trí băng vết thương .

Sau khi sử dụng xong bỏ vào thùng rác y tế và tuân theo hướng dẫn để xử lý an toàn tất cả chất thải y tế.

使用膠帶將其固定，以免其從傷口部位掉落

使用好後丟進醫療垃圾桶與遵守醫療廢質安全處理引導。